

商品パッケージ

メソッド

● ハンモック セラピー・ベーシック メソッド(ライセンス取得含む)

※ 一定期間、ハンモック セラピー ベーシック メソッドを受講していただき
ライセンスを取得していただく必要があります

設 備

- アルミゲージ本体
- オリジナル高耐久ハンモック4個
- ハンモック吊り下げ用
自由長さ調整ワンタッチベルト8本

▶ ゲージ寸法

外寸 H2100mm W1000mm D2200mm
内寸 H2000mm W 800mm D2000mm



※ 「ハンモック セラピー」をお使いいただくには、自動昇降ベッドが別途必要です。

価 格

● ¥ 1,200,000 (税別)

ハンモックセラピー・ベーシックメソッド ライセンス含む

● 追加メソッド(アドバンス)供給は別途有償

※ ハンモック セラピー ベーシック メソッドを取得後、一定期間お使いいただき条件をクリアされた方は、
アドバンスメソッドの取得が可能です。(受講費用・取得費用が別途必要です。)

実用新案特許取得

● 認定番号 第3192185号

※ 受講した方以外のメソッドおよびハンモックの使用は認められません。
※ 弊社メソッドの内容以外の方法で使用して事故が起きた場合、弊社は一切の責任を負いません。



ビーシーラボ 株式会社

〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエスト オフィスタワー19F
TEL:06-6450-9356 FAX:06-6450-9357 e-mail:info@bclab.jp

日本初 ハンモックを利用した 医療系メソッド

Hammock Therapy

ハンモック セラピー



Hammock Therapy Hammock Therapy



ハンモックセラピー

2D治療から3D治療への変革

- ▶ **フラットベッドでは導けない関節可動域の増大** ハンモックに吊り下げられた状態にすることで身体に負担なく前後左右に動かすことができ、今まで運動して動かせなかった部位や角度へのアプローチが可能となり関節可動域の増大に導けます。
- ▶ **3Dで構成されている人体構造に適した施術が行える** 通常のヘッド・床などで行われていた平面的な施術から3Dな人体構造に適した捻転や回旋を加えた施術を、中空状態で体勢を変える事なく立体的なアプローチが可能となります。

中空状態

- ▶ **重力分散** 使用するハンモックは独特の編み込み構造を持ち、一か所だけに圧力が加わらないようになっています。そのため重力からの影響を分散し、身体への負担を最小限に抑える事が出来ます。
- ▶ **抗重力筋の緊張緩和** 姿勢を保つ筋肉の抗重力筋を中空にする事で、重力から解放され異常緊張・異常弛緩が軽減し本来の生理的湾曲に導けます。
- ▶ **患者、術者双方に無駄な力がかからない** 吊り下げる事で患者は重力負荷分散効果でリラックスでき、術者は患者の重さを利用することで無理な力を入れる事なく施術が可能となります。

ポジショニングセラピー

- ▶ **猫背、脊柱側弯、前弯過大等の姿勢改善** 頭部・胸部・腰部・脚部の部分調整が出来るようになっている為、猫背・脊柱側弯・前弯過大などの色々な症状に合わせた無限のアプローチが可能です。
- ▶ **物療機器の同時使用も可能** 吊り下げる事で筋肉が弛緩してる状態で物療機器が使える、また関節可動域を広げた姿勢をキープしながら物療機器の使用が可能になりより効果が高まります。

ゆりかご効果

- ▶ **メンタル・フィジカルの相互リラックスと自律神経調和作用** 心地よい揺れが交感神経と副交感神経のバランスを保つ事でメンタルとフィジカルの相互リラックスに繋がります。

導入について

- ▶ 工事不要で設置可能
- ▶ 複数設置可
- ▶ 販売価格にベーシックプログラム含む

ビジネス

- ▶ 他の治療院との差別化
- ▶ 集客効果
- ▶ 見た目の訴求効果も抜群
- ▶ 完全自費プランで提供可能